

1/ Allumez le LifeLine en appuyant sur le bouton « ON » et suivez les instructions vocales



2/ Prenez le sachet d'électrodes placé à l'arrière de l'appareil




3/ Ouvrez le sachet d'électrodes



4/ Sortiez les électrodes du sachet



5/ Placez les électrodes sur le torse du patient comme les illustrations vous indiquent

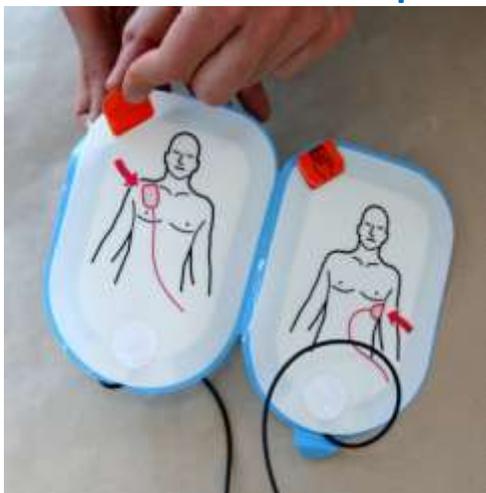

6/ Une fois placées, le LifeLine débutera l'analyse du patient



Cas n° 1 :
Le patient est en arrêt cardiaque

Cas n° 2 :
Le patient n'est pas en arrêt cardiaque

OU

Le LifeLine vous signalera que le patient nécessite un choc et vous demandera de vous écarter. Un décompte sera alors annoncé par le LifeLine et à l'issue de ce décompte un choc sera délivré automatiquement pour réanimer le patient.

Le LifeLine le détectera et aucun choc ne sera délivré. Le LifeLine continuera à vous guider en attendant l'arrivée de l'équipe médicalisée.

Conclusion :
Avec le LifeLine, tout le monde peut sauver une vie !